

ポジクッション®

やさしいポジショニング

ポジクッション



ポジクッションT (耐熱タイプ)



RAKUDES (ラクデス) について




ラクデスとは、創業 昭和32年／株式会社丸井商事 製造メーカーの自社ブランドです。

現在もOEM(相手先ブランド製造)として、量販店様、百貨店様、卸会社様→小売店様へ納品させて頂いておりますが、この度、自社商品の展開を始めました。

素材、加工技術、睡眠環境、人間工学などの知見ノウハウを活かして商品作り致します。

ロゴは、地球の中に『人』と『品』を表し、人は、無重力状態のニュートラルな姿勢をイメージしています。健康、良い睡眠が取れることで、周囲にも幸せが広がります。

介護現場にも分かりやすい、やさしいポジショニング

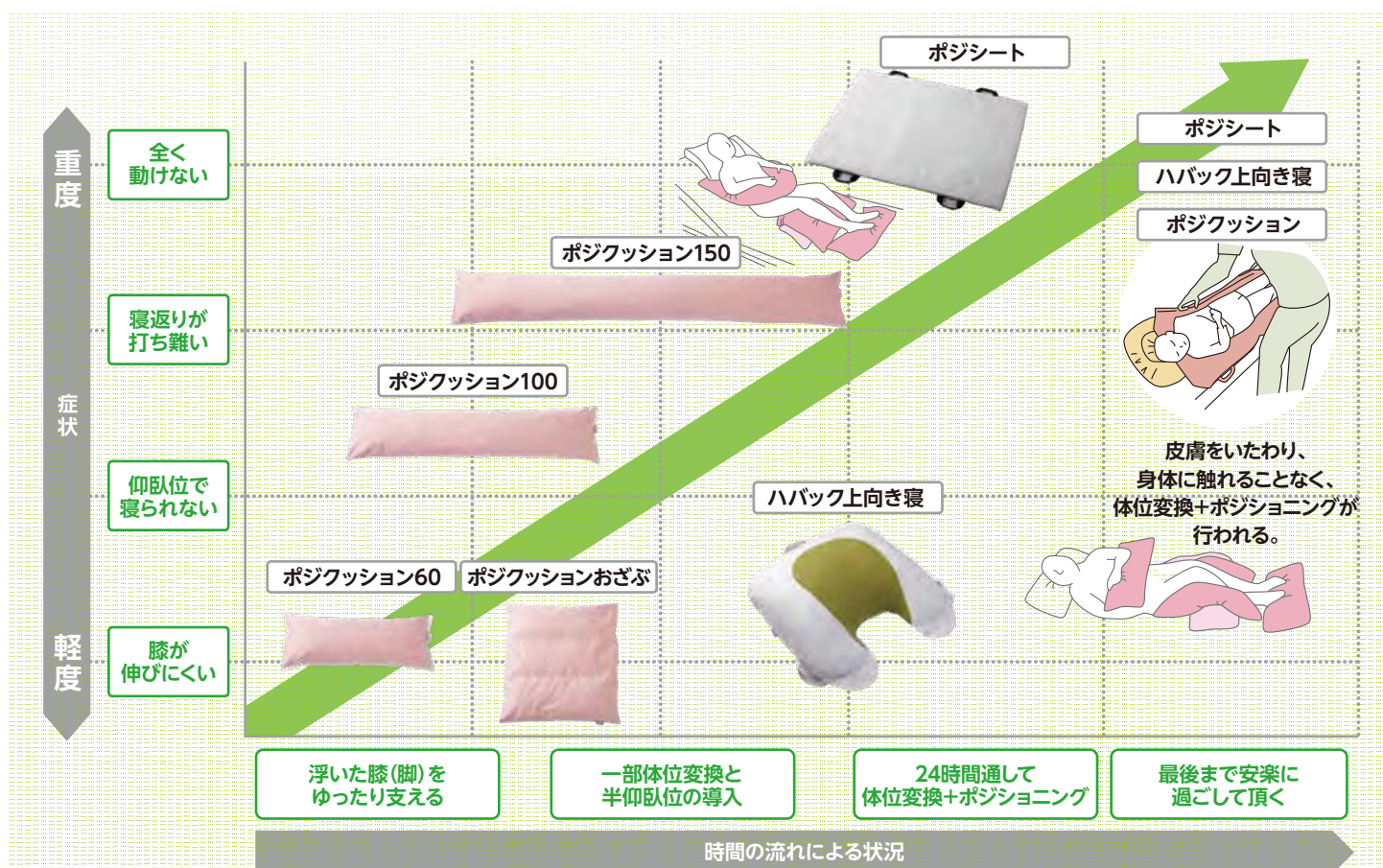

やすらぎと、楽しさと、健康のために、社会貢献をめざしています。

軽度の時からのご使用がオススメです
《クッション1ケで姿勢が変わる》

特長

特長 1 「日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズ」から「現代の日本人 男女問わず適したサイズ」を2種類ラインアップ

※ 参考資料: 日本人身長計測データ

特長 2 「中素材は、動いて押せば安定」 【特許登録 第5762727号】




流動性と安定感を確保!

流動性がありながら、押せば安定する。特殊開発素材「ナジーム®」+ビーズ

細かくウレタンを特殊加工した【ナジーム】とビーズを混ぜ合わせることで、振れば自由に動き、押せば素材同士が絡み合い形状を安定させます。

素材の変形量や弾力性を吟味して、心地よさを追求しました。


圧縮試験の結果【硬さ40% (N)】

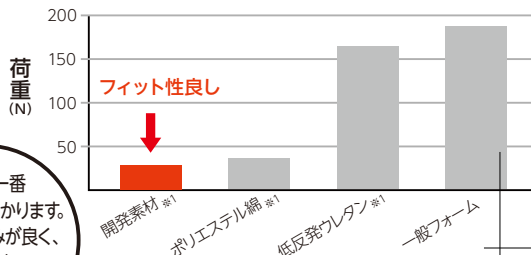

反発が一番少ない事がわかります。これは馴染みが良く、フィット性に優れている証です。

圧縮試験の結果【硬さ40% (N)】

圧縮試験の結果【最大荷重 (N)】

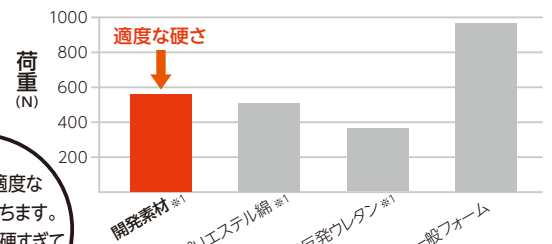

底付かず、適度な柔らかさを保ちます。ビーズ単体では硬すぎて縫製が裂けました。

圧縮試験の結果【最大荷重 (N)】

※1 グラフは、静岡県工業技術研究所 平成25年度工技企第1-47号の数値により作成 一般フォームは自社測定
※2 ポジクッション・ピンク色タイプのデータ値です。グリーン色は、ピンク色のデータ触感に合わせ配合しています。

特長 3 「体圧が分散され、姿勢もよくなる」

身体をクッションで支えることで、拘縮・変形のある方でも安楽に休んでいただけます。

クッションなし



ねじれる


ポジクッションあり



ひろがる

※ ポジクッション・ピンク色での測定値です。被験者: 女性145cm、45kg

特長 4 「表生地は、ポジョニングに適した摩擦力」

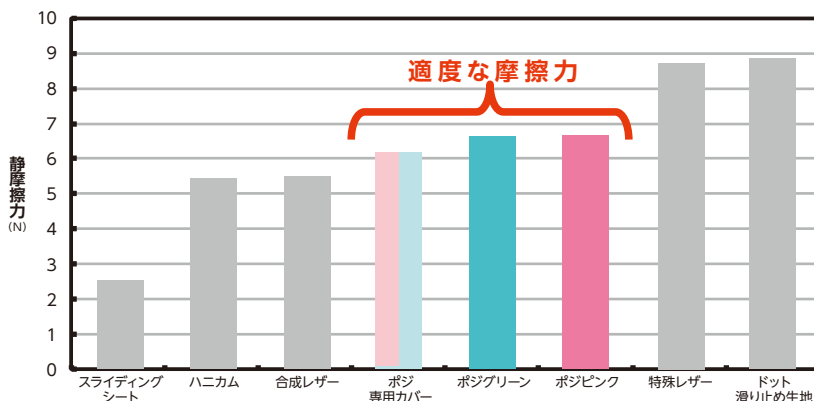










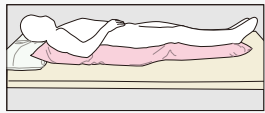
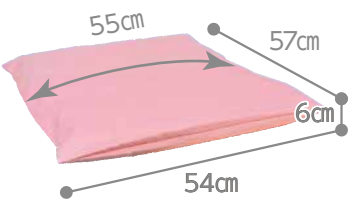
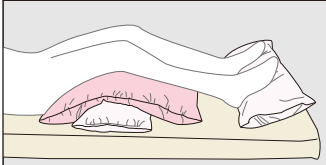
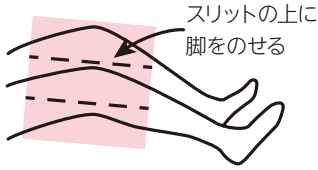
表面生地の摩擦力試験データ

身体がのった際に、滑り過ぎず引っ掛かり過ぎない適度な摩擦力で安定します。

商品ラインナップ

ピンク色


◎小柄な方向け ◎現場にわかりやすいポジショニング

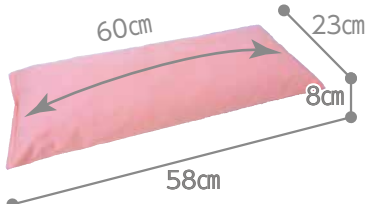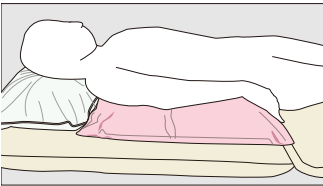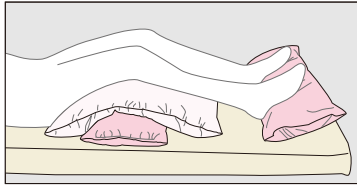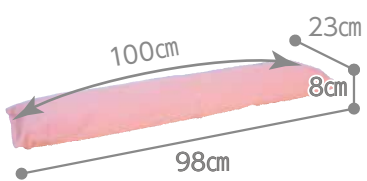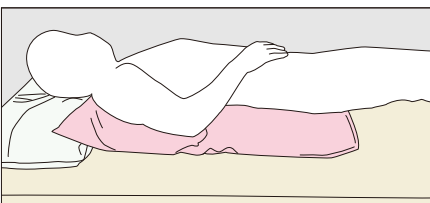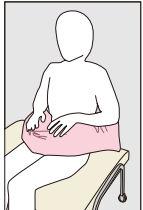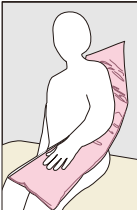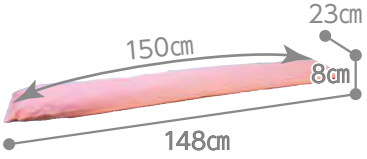品名	サイズ	使用例
ポジクッション 60	24×60cm  介助者レベル 初級～上級	[人気ナンバー1の形状で、様々な部位にフィットします]  腕置き  膝下 足底(尖足予防)
ポジクッション 100	24×100cm  介助者レベル 初級～上級	[ユーザー様からの圧倒的支持]  半側臥位 頸部～腰  腕置き  肩～指先まで
ポジクッション 150	24×150cm  介助者レベル 初級～上級	[一本のクッションを軸に体幹を整えます]  L字で使用 仙骨を浮かしてあげる  I字で使用 上肢
ポジクッション おざぶ	55×59cm  介助者レベル 初級～上級	[下肢のポジショニングに最適] 伸びにくい膝を安定させることで身体全体が安楽になる!  坐骨手前～下肢  スリットの上に脚をのせる

モデル身長 153cm

〔仰臥位〕

〔半仰臥位〕

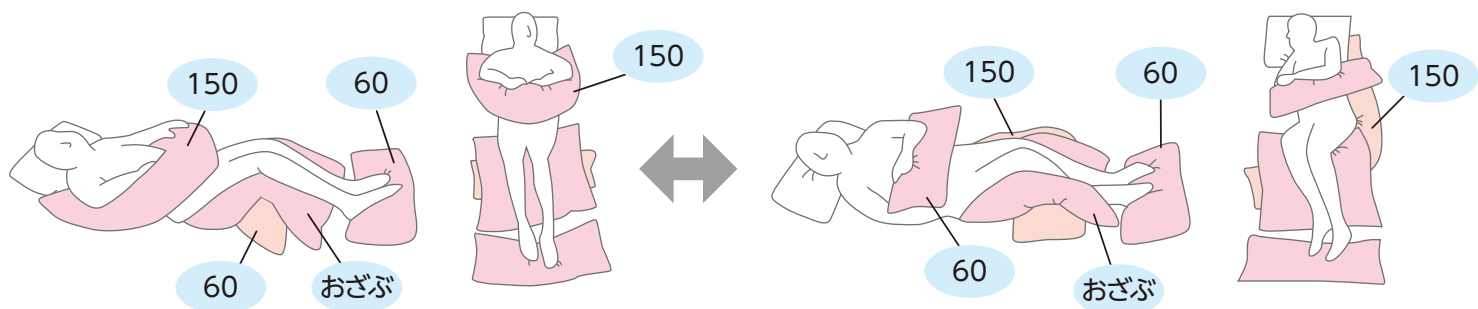


商品ラインナップ

グリーン色 (耐熱タイプ)

◎現代の日本人の体格をカバーできるサイズ展開


品名	サイズ	使用例
ポジクッション 18T	18×40cm 介助者レベル 初級～上級	〔どんな腕の太さでも安定〕 腕置き 車椅子の肘あて その他 ・クッションや枕のアンカー ・身体と車椅子やベッドの隙間埋め
ポジクッション 60T	24×60cm 介助者レベル 初級～上級	〔人気ナンバー1の形状〕 腕置き 膝下 足底 (尖足予防)
ポジクッション 100T	30×100cm 介助者レベル 初級～上級	〔ふくよかな方も支えられます〕 半側臥位 肩～腰 肩～指先まで
ポジクッション 180T	30×180cm 介助者レベル 中級～上級	〔一本で体幹を整えます〕 中素材を均す 身体に中素材を合わせる リラックス
ポジクッション おざぶT	59×63cm 介助者レベル 初級～上級	〔下肢のポジショニングに最適〕 坐骨手前～下肢 スリットの上に脚をのせる
ポジクッション 80角T	80×80cm 介助者レベル 初級～上級	〔用途多様、大判サイズ〕 ゆったり下肢をのせる 高さ 約30cm 形状の変化

モデル身長 169cm

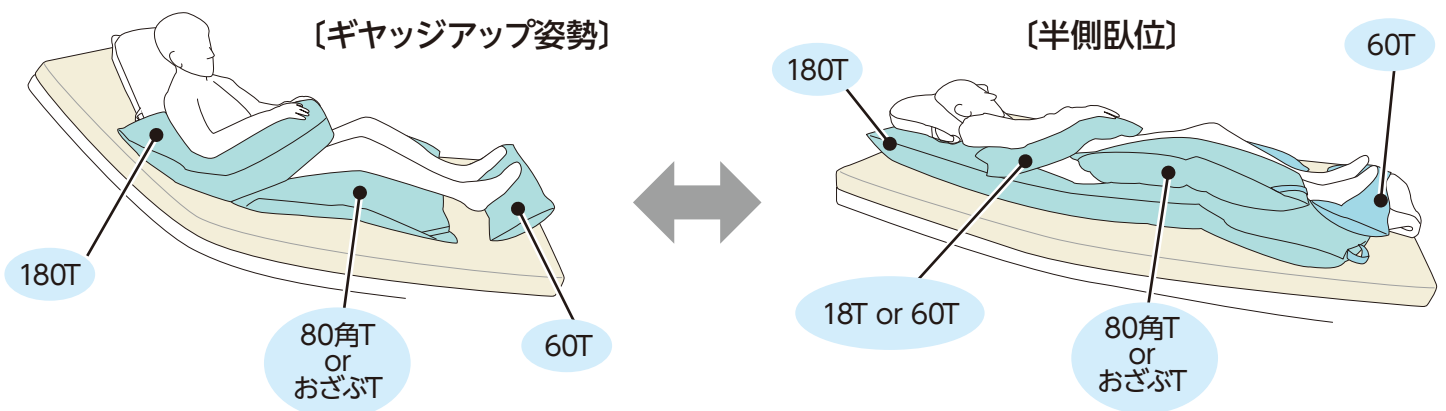

比較

比較 1 「サイズが少し異なります」

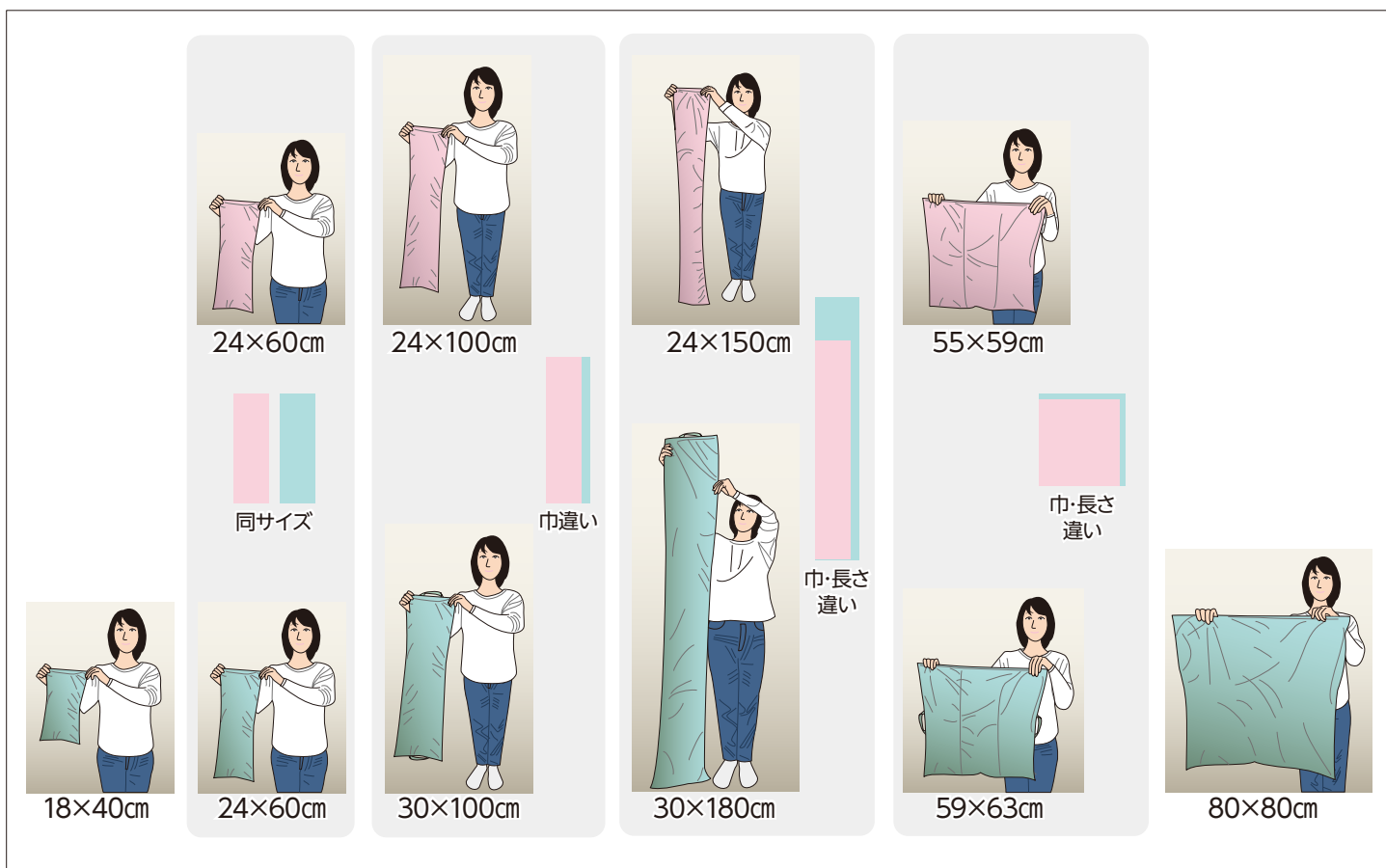

モデル身長 153cm

比較 2 「自宅でのお洗濯が可能！」

ピンク色	温水40℃以下、乾燥機は80℃まで対応	洗濯 40℃	乾燥 80℃
グリーン色 (耐熱タイプ)	温水95℃以下、乾燥機は100℃以下、オートクレーブ105℃まで対応	洗濯 95℃	乾燥 100℃

比較 3 「体位変換器として、ポジクッション100T、180T、おざぶT、80角Tが対象になっています」

ピンク色	体位変換器ではございません			
グリーン色 (耐熱タイプ)	100T	180T	おざぶT	80角T
	・取っ手が付いています			介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

専用カバー

形状は、ファスナーを使わない、かぶせ式で全体をカバーします


両側かぶせ式 ポジクッション100、150、ポジクッション100T、180T

<ポジクッション100T専用カバーの場合>



片側かぶせ式 ポジクッション60、おざぶ、ポジクッション18T、60T、おざぶT、80角T

<ポジクッションおざぶ専用カバーの場合>

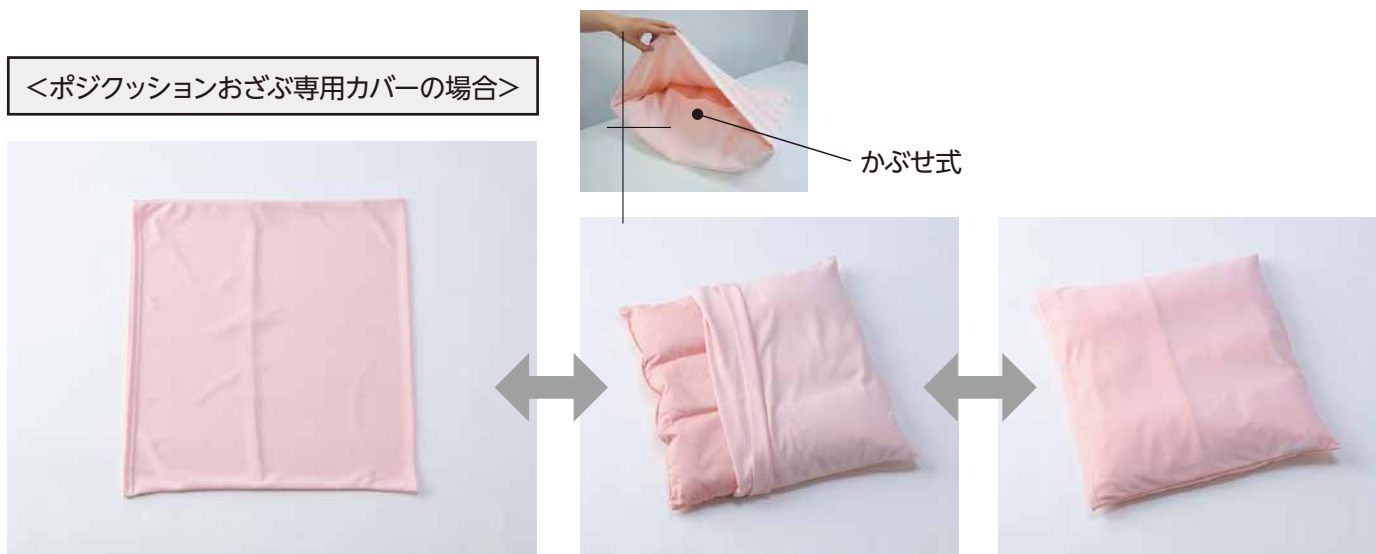

<生地の特長>

肌にふれた時、とてもなめらかでシルクよりさらに、やさしい感触です。
ムレやベタつき感を抑え、「吸放湿性能」に優れ、さらに、静電気を素早く逃がします。

ストレッチ生地でセッティングしやすく、中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」が特長です。

<お洗濯>



吸湿・放湿・吸汗・速乾・UV

本体に合わせたお色を準備しています。



〔監 修〕 社会福祉法人 五十鈴会
介護老人福祉施設 五十鈴荘
〔技術協力〕 静岡県工業技術研究所
ファルマバレーセンター

製造販売元

株式会社丸井商事／ラクデス

〒424-0045静岡県静岡市清水区東大曲町4-18

TEL.054-366-1612 FAX.054-366-1738

ホームページ： <https://www.rakudes.com/>

日本製

ラクデス クッション

検 索 

